

UltraSept

Sensitive

SOLUÇÃO MULTIUSO ESTÉRIL

Lentes de Contato Gelatinosas

APRESENTAÇÕES

UltraSept Sensitive é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 120 mL e 360 mL.

PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)

DESCRIÇÃO

UltraSept Sensitive tem ação de limpar, desinfetar, enxaguar, lubrificar e conservar as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) e de silicone hidrogel sem irritar os olhos.

UltraSept Sensitive proporciona conforto prolongado durante todo o dia, mesmo para olhos sensíveis. Umidifica as lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto causado durante o uso das lentes. É indicado para desinfetar, limpar, enxaguar, lubrificar e conservar lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) e de silicone hidrogel.

COMPOSIÇÃO

Ácido hialurônico (hialuronato de sódio), glicerina bi-destilada, sorbitol, poloxâmer 407, ácido bórico, cloreto de sódio, citrato de sódio (anidro), edetato dissódico di-hidratado, cloridrato de polihexametileno biguanida, água purificada. Pode conter aminoetilpropanol e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH.

INDICAÇÕES

UltraSept Sensitive é indicada para limpeza, desinfecção, enxágue, lubrificação, conservação diária e armazenamento de todas as lentes de contato hidrofílicas gelatinosas (hidrofílicas) e de silicone hidrogel.

CONTRAINDICAÇÕES

UltraSept Sensitive é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Como qualquer produto para saúde, descontinuar o uso em caso de alergia a quaisquer dos componentes da fórmula.

INSTRUÇÕES PARA USO

1º passo - As mãos

Sempre lavar com água e sabão e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato e o frasco de **UltraSept Sensitive**.

2º passo - Limpeza e fricção

Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com **UltraSept Sensitive** e, com o dedo indicador da outra mão, fricção-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos ou danos à mesma. Enxaguar a lente com **UltraSept Sensitive** antes de acondicioná-la no estojo.

3º passo - Enxágue, desinfecção e conservação

Coloque as lentes limpas no estojo previamente limpo, sem resíduos, e encha-o com **UltraSept Sensitive**. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas. A solução utilizada para desinfecção e acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e enxágue-as antes de colocá-las nos olhos.

4º passo - Cuidados com o estojo

a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com **UltraSept Sensitive** antes de usá-lo, para eliminar qualquer resíduo.

b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguá-lo com **UltraSept Sensitive**.

c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com **UltraSept Sensitive** e encha-o com esta solução após completar o enxágue.

d) A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao

flutuar, saia do estojo ou seja danificada pela tampa domesmo.

e) Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu programa de uso das lentes.

ADVERTÊNCIAS

Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para a correta conservação de suas lentes de contato, bem como dos acessórios envolvidos em seu cuidado, incluindo o estojo.

ATENÇÃO:

SE VOCÊ SENTIR DESCONFORTO PERSISTENTE NOS OLHOS, IRRITAÇÃO, ARDÊNCIA, VERMELHIDÃO, LACRIMEJAMENTO EXCESSIVO OU DISTÚRBIOS NA VISÃO, DESCONTINUE IMEDIATAMENTE O USO DA SOLUÇÃO, RETIRE AS LENTES E CONSULTE SEU OFTALMOLOGISTA.

OS CUIDADOS COM AS LENTES DEVEM SER DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MÉDICO OFTALMOLOGISTA.

PRECAUÇÕES

a) Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.

b) Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas.

c) Quando não estiver sendo utilizado, manter o frasco limpo, sem resíduos de produto na parte externa, e bem fechado.

d) Respeitar a data de validade marcada no produto.

e) Descartar o restante da solução após três meses da abertura do frasco.

f) Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

g) Não usar para desinfecção térmica.

h) Sempre usar uma solução nova de **Ultrasept Sensitive**. Não reutilizar a do seu estojo para lentes.

i) Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes de **Ultrasept Sensitive**. Como qualquer produto para saúde, descontinuar o uso em caso de alergia a quaisquer dos componentes da fórmula.

j) As lentes podem ser armazenadas em um estojo fechado por um período máximo de 30 dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo, limpe-as da forma recomendada e desinfete-as com **Ultrasept Sensitive** cada vez que for usá-las.

ATENÇÃO:

SE VOCÊ SENTIR QUALQUER DESCONFORTO NOS OLHOS, IRRITAÇÃO, ARDÊNCIA, VERMELHIDÃO, LACRIMEJAMENTO EXCESSIVO OU DISTÚRBIOS NA VISÃO, SUSPENDA IMEDIATAMENTE O USO DO PRODUTO, RETIRE AS LENTES E CONSULTE SEU OFTALMOLOGISTA OU O CENTRO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO.

INFORMETAMBÉM À EMPRESA ATRAVÉS DO SEU SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o produto com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após aberto, válido por 3 meses, caso mantido em condições de temperatura, umidade e limpeza adequadas.

Características físicas e organolépticas do produto: **Ultrasept Sensitive** é uma solução límpida, incolor a levemente amarelada.

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. PRAZO DE VALIDADE

24 meses após data de fabricação. Após aberto, válido por 3 meses, caso mantido em condições de temperatura, umidade e limpeza adequadas.

PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)

NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA.

Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 91790-005

Fone +55 51 3250.8256

CNPJ: 87.375.952/0001-78

Resp. Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt

CRF-RS 14228

Registro ANVISA/MS: 80256510013

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Distribuição e Comercialização:

KLEY HERTZ FARMACÊUTICA S.A.

Rua Comendador Azevedo, 224 | Bairro Floresta

Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 90220-150

CNPJ: 92.695.691/0001-03

INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.kleyhertz.com.br

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 704 9001