

INSTRUÇÕES DE USO

ADAPTIS FRESH

Ação:

Lubrificante e umectante ocular externo em casos de secreção lacrimal insuficiente ou lesão córnea. O ácido hialurônico é aderido à córnea e ao epitélio, aumentando o tempo de quebra (BUT) do filme lacrimal detectado com a fluoresceína e produzindo um alívio quase instantâneo dos sintomas do olho seco.

A estrutura do ácido hialurônico pode ser comparada a uma esponja constituída por uma estrutura de cadeias de polissacarídeos com água abundante presa entre essas moléculas.

A diluição do ácido hialurônico varia a proporção de polissacarídeos com relação à água, porém retém suas propriedades umectantes, lubrificantes, aderentes e viscoelásticas.

Essas propriedades facilitam a adesão do ácido hialurônico à superfície das células, suavizando a irritação dos olhos nos casos de ceratite seca.

Indicações:

Manifestações inflamatórias oculares externas (queratoconjuntivite seca) devido à secreção lacrimal insuficiente ou secreção excessiva, exposição ao vento, sol ou substâncias irritantes.

Lubrificante para o tratamento da Síndrome do olho seco.

Composição:

Cada ml contém:

Hialuronato sódico 4,00 mg, Fosfato monossódico dihidratado 0,90 mg, Fosfato dissódico anidro 3,10 mg, Cloreto de sódio 7,30 mg, Hidroximetilglicinato de Sódio a 50% 0,04 mg, Edetato dissódico dihidratado (EDTA) 0,50 mg, Água purificada q.s.p 1ml

Instruções de uso:

Uma ou duas gotas no saco conjuntivo do(s) olho(s) afetado(s) três vezes ao dia são recomendadas como posologia de orientação. De acordo com a necessidade de cada paciente, a frequência de aplicação será determinada.

Contra indicações:

Hipersensibilidade conhecida a qualquer dos componentes da fórmula.

Advertências:

Caso a condição piore e persista por mais de 72 horas, apareçam dor ou alterações da visão e/ou irritação do olho piore, suspenda o uso do produto e consulte um profissional.

Use o produto apenas caso a embalagem esteja intacta.

Não use o produto após a data de validade indicada.

É aconselhável evitar o uso simultâneo de detergente ou soluções antissépticas.

Precauções:

Os pacientes devem ser instruídos a evitar que a ponta da embalagem entre em contato com os olhos, estruturas ao redor, dedos ou qualquer outra superfície, porque pode provocar uma contaminação bacteriana na ponta, comumente causando infecções nos olhos. O uso de soluções contaminadas pode causar uma lesão séria ao olho e perda subsequente da visão.

Reações adversas:

Em casos raros, uma breve diminuição da visão foi observada com a instilação, o que é devido à densidade da solução, que o efeito desaparece rapidamente.

É possível observar em alguns casos raros a intolerância (queimação ou irritação) sem consequências posteriores, que não requerem modificação do tratamento.

Informações ao paciente:

Os pacientes devem ser instruídos que, caso desenvolvam uma condição ocular intercorrente (por exemplo, trauma ou infecção) ou estejam sujeitos a uma cirurgia ocular, consultem imediatamente o médico com relação à continuação do uso da embalagem multidoses que estavam utilizando.

Deve-se recomendar aos pacientes que, caso desenvolvam qualquer tipo de reações oculares, particularmente conjuntivite e reações na pálpebra, eles devem buscar ajuda médica imediatamente. Caso mais de uma droga oftálmica tópica seja administrada, as drogas devem ser administradas pelo menos com um intervalo de 5 (cinco) minutos entre elas.

Os pacientes devem ser instruídos a manipular corretamente a ponta conta-gotas do frasco, evitando o contato com o olho e estruturas adjacentes ou qualquer outra superfície. A manipulação incorreta do conta-gotas pode contaminá-lo, causando infecções nos olhos. A utilização de produtos contaminados pode causar lesões sérias nos olhos, com uma diminuição subsequente da visão.

O frasco deve ser imediatamente fechado após cada instilação.



O frasco não aberto pode ser utilizado até a data de validade indicada na caixa.

Como é fornecido

Frasco com conta-gotas contendo 2,5ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml e 30 ml de solução oftálmica estéril.

Estéril – Esterilizado por Filtração - DESCARTE O PRODUTO APÓS UM MÊS DE SUA ABERTURA.

Armazenamento, conservação e/ou manipulação, instruções para uso, advertências e/ou precauções: VER INSTRUÇÕES DE USO.

Condições de armazenagem:

Manter à temperatura ambiente (15 a 30°C).

Proteger da luz e manter em lugar seco.

Registrado e Fabricado por: NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, s/ nº, Km 08.

Chácara Assay – Hortolândia – SP

CNPJ: 72.593.791/0005-45

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Comercializado por LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Hortolândia – SP

SAC 0800500600

Registro ANVISA nº 81838110001